

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 Kit Teste Rápido (Strip)



Kit de teste de anticorpos IgM/IgG para coronavírus 2 (SARS-CoV-2), de síndrome respiratória aguda grave pelo método ouro coloidal

IgM e IgG 2-em-1

Garantia de otimização do material

Interpretação rápida dos resultados

Operação simples e conveniente

Característica do Produto

IgM e IgG 2-em-1

2 resultados de um teste, que podem determinar simultaneamente o status negativo / positivo de IgM e IgG.

A garantia de otimização de material

Os fragmentos de proteína N e S otimizados de SARS-CoV-2 podem melhorar a capacidade de detecção.

Interpretação rápida dos resultados


Em circunstâncias normais, os resultados podem ser observados dentro de 10 a 15 minutos. Após 15 minutos, os resultados são inválidos.

Fortes resultados positivos podem ser observados em 150 segundos.


Operação simples e conveniente

Avaliação de resultados sem o auxílio de instrumentos

PROCEDIMENTO

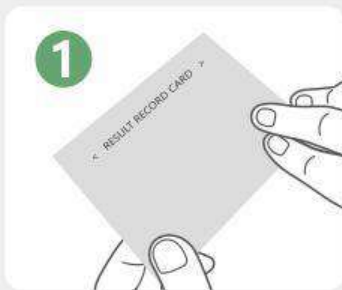


1
Retire o Cartão de Registro de Resultados e coloque-o na horizontal sobre a mesa

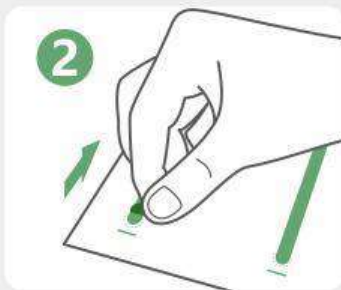

2
Rasgue a área da fita com a marca OPEN



3
Retire a tira de teste com cuidado e, em seguida, cubra imediatamente a tampa para evitar que as outras tiras de teste se molhem

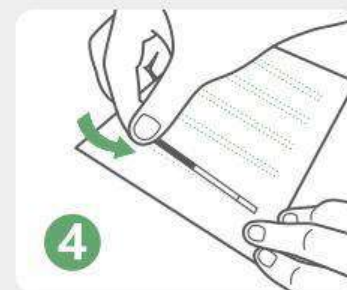

4
Cole a tira de teste na área pontilhada (Proibido pressionar a área de carregamento) e escreva o número de identificação nela



5
Absorva a amostra



6
Adicione a amostra verticalmente na parte superior da área de carregamento



7
Adicione o diluente verticalmente na parte inferior da área de carregamento




8
Espere 10 a 15 minutos

Video tutorial



Aguarde 10 a 15 minutos para observar o resultado

Interpretação do Resultado

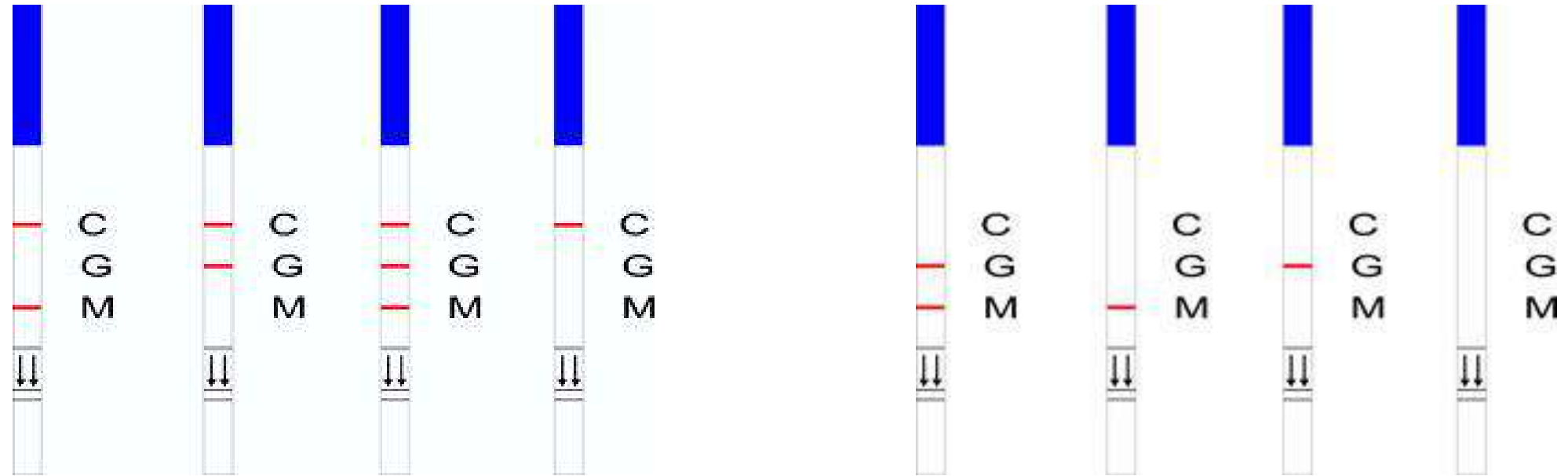

IgM
Positivo

IgG
Positivo

IgM, IgG
Positivo

Negativo

Inválido

Inválido

Inválido

Inválido

Informações de Produção

Nome do produto	Especificação	Nº Catálogo
<p>Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) IgM / IgG Kit de Teste de Anticorpos pelo Método Ouro Coloidal</p>	<p>50 Testes/Tubo ×2</p>	<p>EIM4103080</p>